

Guía rápida de uso



DE POR VIDA

Aplica en medidor de glucosa.



Puerto micro USB



Pantalla

Teclas

Guía para la tira reactiva

Ventanilla de medición


Tapa de la ventana de medición

Guía rápida de uso

ACCU-CHEK® Active


Roche

Vista general: Medidor y tira reactiva

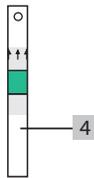


- 1 Pantalla
- 2 Teclas
- 3 Guía para la tira reactiva
- 4 Tira reactiva

MARCADORES DE RESULTADOS

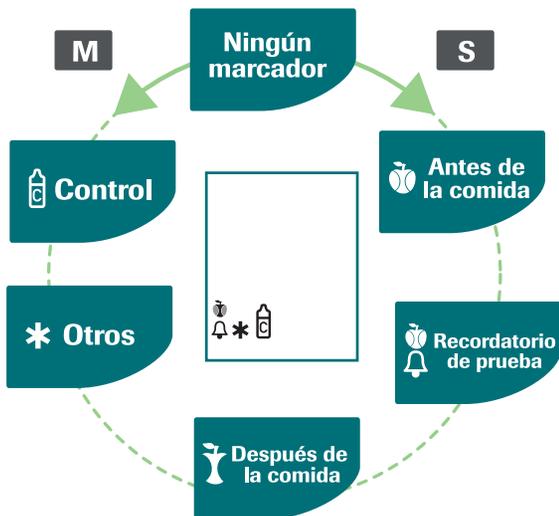

Introduzca la tira reactiva en la guía para la tira reactiva, en la dirección de las flechas y sin doblarla.

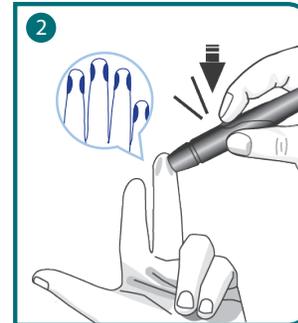

Presione el dispositivo de punción con fuerza sobre el lugar de punción deseado en un lado de la yema del dedo. Apriete el botón disparador.




Cuando aparezca el símbolo de la gota parpadeando: Aplique la gota de sangre en el centro de la zona de color verde.

El símbolo del reloj de arena parpadeando indica que la medición está en proceso.




Cuando aparezcan el símbolo de la tira reactiva y el símbolo de la gota parpadeando: Extraiga la tira reactiva del medidor.

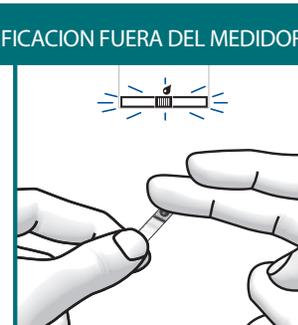


A continuación los símbolos de la tira reactiva y de la gota parpadean en la pantalla. Ahora dispone de aprox. 20 segundos para aplicar la sangre en la tira reactiva y volver a introducir la tira en el medidor.



El símbolo del reloj de arena parpadeando indica que la medición está en proceso.

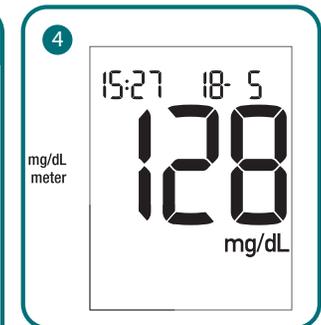

Si la dosificación es dentro del medidor, el resultado se muestra en la pantalla en 5 segundos. Si se dosifica fuera del medidor, se muestra en 8 segundos.

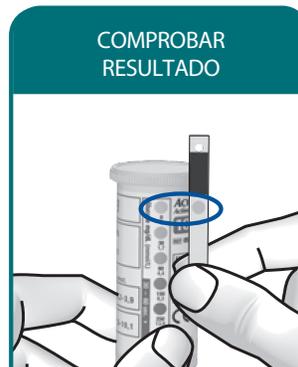

CentroACCU-CHEK®
5081-5857
01800 90 80 600
mexico.accucheck_diabetes@roche.com



Referencia. 1. García-Mayor R. Monitorización de la glucemia capilar en pacientes con diabetes mellitus de tipo 2 no tratados con insulina.

ACCU-CHEK®