

# Guía rápida de uso



DE POR VIDA

Aplica en medidor de glucosa.



Borde Antiderrapante

Tecla On/Off/Set



Pantalla

Teclas

Ranura de la tira reactiva

# Guía rápida de uso

# ACCU-CHEK® Performa

Roche

## Visión general del medidor



- 1 Tecla On/Off/Set
- 2 Pantalla
- 3 Teclas flecha derecha y flecha izquierda
- 4 Ranura de la tira reactiva
- 5 Tapa del compartimento de la pila
- 6 Ventana de infrarrojos (IR)


## Marcadores de resultados





Para tener un mejor control de la glucosa usted puede marcar los resultados de sus mediciones. Se podrá hacer mientras la tira de prueba aún esté en el medidor y el resultado se muestre en pantalla.



Para marcar un resultado, con la tira de prueba todavía en el medidor, presione y suelte las teclas para desplazarse por los marcadores y el recordatorio de prueba. Cuando aparezca el marcador o recordatorio que desea seleccionar, retire la tira de prueba del medidor.

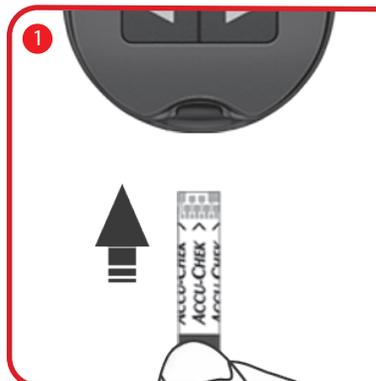


Inserte la tira reactiva en el medidor según la dirección de las flechas hasta que el medidor emita una señal sonora. Aparece el símbolo de la gota de sangre parpadeando.

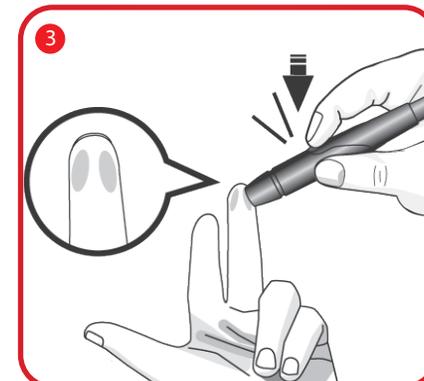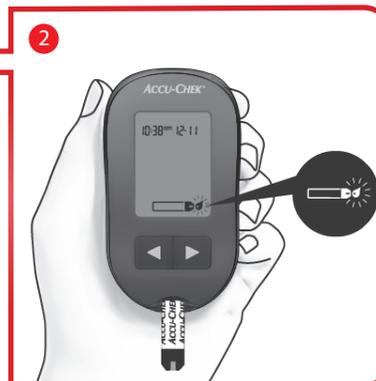


Coloque el dispositivo de punción presionando firmemente contra el lateral de la punta del dedo, junto a la yema, y pulse el botón disparador amarillo para pinchar el dedo.



Roce el extremo de la tira reactiva con la gota de sangre. No aplique sangre encima de la tira reactiva.

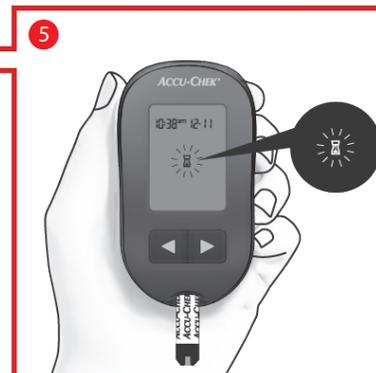

El medidor emite una señal sonora parpadea cuando hay suficiente sangre en la tira reactiva.

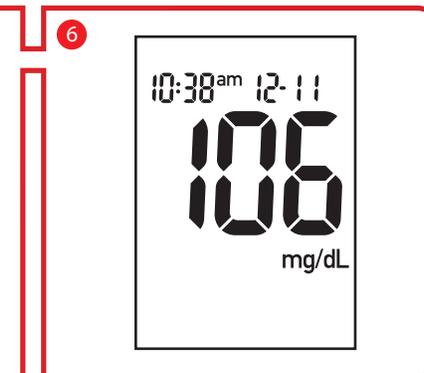

El resultado de medición aparece en la pantalla en 5 segundos.

Centro ACCU-CHEK®

5081-5857  
01800 90 80 600

mexico.accucheck\_diabetes@roche.com



Referencia: 1. García-Mayor R. Monitorización de la glucemia capilar en pacientes con diabetes mellitus de tipo 2 no tratados con insulina.

ACCU-CHEK®