

MENSAJES DE ERROR

PANTALLA

CAUSA

PC

- El medidor está conectado a un ordenador y no es posible realizar una medición de glucosa.

E-1

- No ha introducido la tira reactiva correctamente o no la ha introducido por completo.
- Ha introducido una tira reactiva usada en el medidor.
- Ha aplicado sangre demasiado pronto en la tira reactiva, es decir, antes de que el símbolo de la gota parpadeara en la pantalla.
- La ventanilla de medición está sucia.

E-2

- No ha aplicado suficiente sangre en la tira reactiva.
- Ha transcurrido demasiado tiempo para aplicar una segunda gota de sangre.
- La tira reactiva ha sido doblada o movida durante el proceso de medición.
- Su valor de glucemia es posiblemente muy bajo.

E-4

- Ha conectado el medidor con el ordenador encendido durante la medición.

E-5

- El medidor está expuesto a una intensa radiación electromagnética.

E*5


- El medidor está expuesto a demasiada luz.

EEE

- Se ha producido un error en el medidor.

EEt

- La temperatura ambiente o la temperatura del medidor es demasiado alta o demasiado baja para realizar una medición.

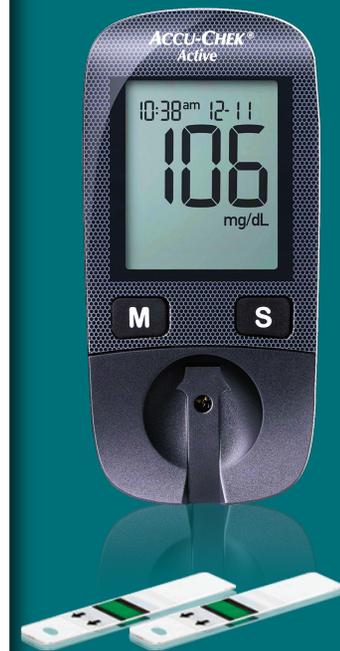

Reg. No: 1996E2017 SSA

No. Autorización: 1833002T1B0083

Centro Accu-Chek® 5081-5857 y 01800 90 80 600
 Horarios: lunes a viernes de 9:00 a 19:00 h sábado de 9:00 a 15:00 h
www.accu-chek.com.mx

©2018 Roche DC México, S.A. de C.V. Accu-Chek®, Accu-Chek® Active son marcas comerciales registradas propiedad de Roche Diabetes Care GmbH. Roche® es una marca registrada propiedad de Productos Roche, S.A. de C.V.

CONSULTE A SU MÉDICO. LEA LAS INSTRUCCIONES DE USO