

MENSAJES DE ERROR

PANTALLA

CAUSA

E-1

- La tira reactiva puede estar dañada o no está insertada correctamente.

E-3

- Es posible que su nivel de glucemia sea extremadamente alto o que haya ocurrido un error en el medidor o en la tira reactiva.
- Si su resultado de medición coincide con cómo se siente, póngase en contacto con el personal sanitario que le atiende inmediatamente.
- Si su resultado de medición no coincide con cómo se siente, repita la medición de glucemia.

E-4

- La tira reactiva no ha absorbido suficiente sangre para realizar la medición o la muestra ha sido aplicada después de que la medición comenzara.

E-6

- La sangre se han aplicado en la tira reactiva antes de que apareciera en la pantalla el símbolo de la gota parpadeando.

E-7

- Se ha producido un fallo electrónico o, en casos poco frecuentes, se ha retirado y reinsertado una tira reactiva usada.

E-8


- La temperatura es superior o inferior al rango adecuado para el sistema.

E-9

- El medidor casi se queda sin batería.

E-1

- Los ajustes de la hora y de la fecha podrían ser incorrectos.

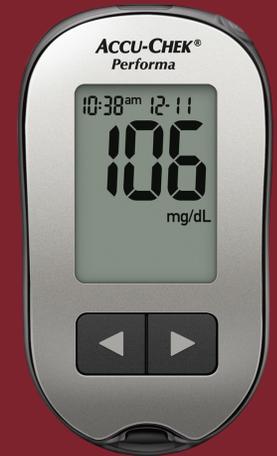

Reg. No: 0409E2015 SSA

No. Autorización: 1833002T1B0083

Centro Accu-Chek® 5081-5857 y 01800 90 80 600
 Horarios: lunes a viernes de 9:00 a 19:00 h sábado de 9:00 a 15:00 h
www.accu-chek.com.mx

©2018 Roche DC México, S.A. de C.V. Accu-Chek®, Accu-Chek® Performa son marcas comerciales registradas propiedad de Roche Diabetes Care GmbH. Roche® es una marca registrada propiedad de Productos Roche, S.A. de C.V.

CONSULTE A SU MÉDICO. LEA LAS INSTRUCCIONES DE USO

ACCU-CHEK®